

ESTROTECT™

Návod k použití:

1. Samolepky před použitím držíme v teple.
(alespoň 37°C, aktivace lepidla)



3. Samolepku přilepíme.
(u jalovic doporučuji přidat extra lepidlo)



5. Připraveno k aktivaci.



2. Místo pro aplikaci okartáčujeme a
otřeme utěrkou (přiloženy v balení).



4. Důkladně uhladíme.



6. Aktivace.



7. Kontrolujeme minimálně 2x denně a zapouštíme až po úplném objevení se fluorescentní barvy.

